



## HUMAPEN® SAVVIO: DIE KURZANLEITUNG.

### Weitere Fragen?

Dann rufen Sie einfach unsere  
Lilly Diabetes Pen-Hotline an!  
Tel: 0800 5455973

(Gebührenfrei montags bis freitags  
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr)

Lilly Deutschland GmbH  
Werner-Reimers-Str. 2-4  
61352 Bad Homburg  
[www.lilly-pharma.de](http://www.lilly-pharma.de)  
[www.lilly-diabetes.de](http://www.lilly-diabetes.de)

*Humapen*®  
savvio



DEDV000215

Lilly Diabetes. Leben so normal wie möglich.

[www.lilly-diabetes.de](http://www.lilly-diabetes.de)


[www.HumaPenSavvio.de](http://www.HumaPenSavvio.de)

*Lilly*

## Die Pen-Bestandteile:




Schutzkappe

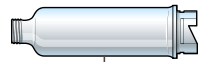


Patronenhalter

Lilly 3 ml  
Insulinpatrone  
(separat erhältlich)

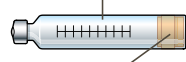

Patronenkolben

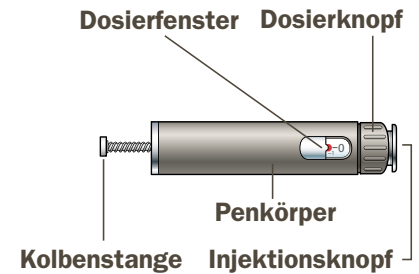

HumaPen® SAVVIO ist ganz einfach anzuwenden. Sie können 1 bis 60 Einheiten injizieren und die Dosis exakt in 1er-Schritten einstellen.

Zu viel eingestellte Einheiten lassen sich ohne Insulinverlust korrigieren.

Es ist nicht möglich mehr Insulineinheiten einzustellen, als in der Patrone vorhanden sind.

## Die Nadel-Bestandteile:

Äußere Nadel-  
schutzkappe



Nadel




Innere Nadel-  
schutzkappe




Schutzpapier




### 1 EINSETZEN DER PATRONE

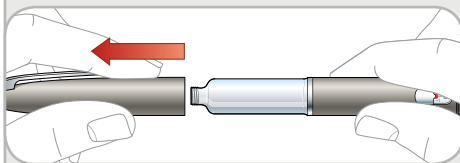

Penkappe abziehen und beiseite legen.

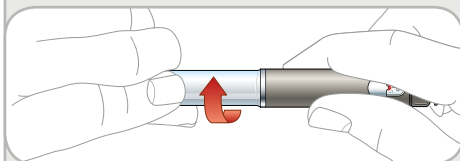


Patronenhalter herausdrehen.

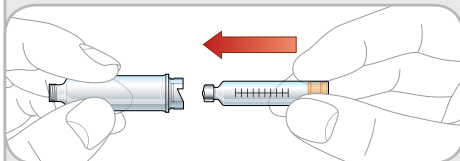

Die 3 ml Insulinpatrone (**nur von Lilly**) mit dem schmalen Ende voran in den Patronenhalter einlegen.




Ggf. Kolbenstange in den Pen schieben.

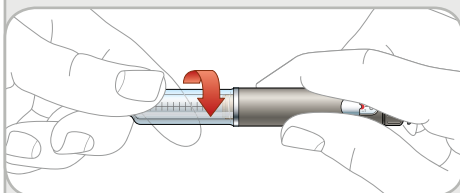


Patronenhalter aufsetzen – festdrehen bis ein „Klick“ zu hören ist.

**!** Hinweis für Insulinsuspensionen: Den Pen 10-mal sanft rollen und dann 10-mal kippen, so dass das Insulin gleichmäßig gemischt aussieht.


### 2 ENTLÜFTEN DES PENS

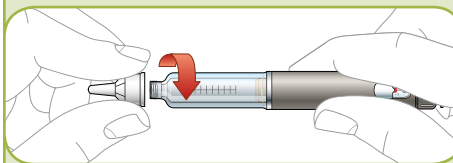


Schutzpapier der Nadel entfernen, Nadel aufsetzen und festdrehen.

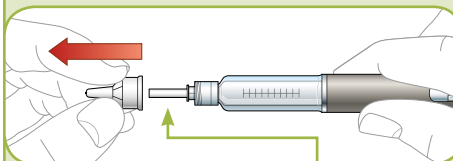

Äußere Nadelschutzkappe entfernen und beiseite legen. **Innere Nadel-schutzkappe** abziehen und wegwerfen.

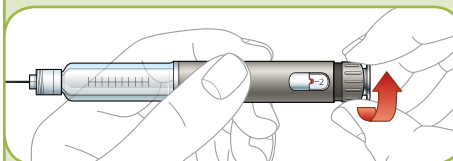


Zwei Einheiten einstellen.

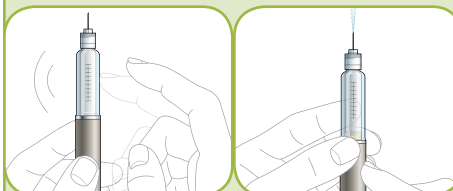


Pen mit der Nadel nach oben halten und leicht seitlich an die Patrone klopfen. Dann Injektionsknopf drücken, so dass Insulin als dünner Strahl austritt.

**!** Vorsicht: Der Pen ist nicht korrekt entlüftet, wenn nur ein paar Tropfen Insulin zu sehen sind.

### 3 INJEKTION

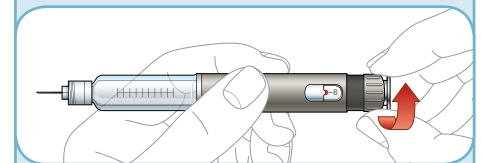


Dosis durch Drehen des Dosierknopfes einstellen und injizieren.

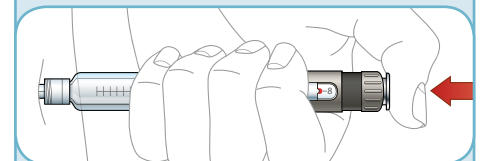

Den Injektionsknopf nach der Injektion **5 Sekunden** lang gedrückt halten. Erst dann die Nadel wieder herausziehen, um die Dosis vollständig zu erhalten.

**!** Hinweis: Nach Herausziehen der Nadel sollte die Zahl **0** im Dosierfenster stehen.

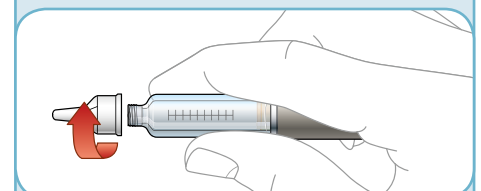

Äußere Nadelschutzkappe wieder auf die Nadel aufsetzen, Nadel entfernen und entsorgen.

HumaPen® savvio