



TERUMO FINETOUCH®

Lanzettengerät Typ S zur kapillaren Blutentnahme




Sicherheit war noch nie so sanft

- *Weniger Schmerz*
- *Sichere Anwendung*
- *Einfache Handhabung*


Sicherheit war noch nie so sanft

Weniger Schmerz

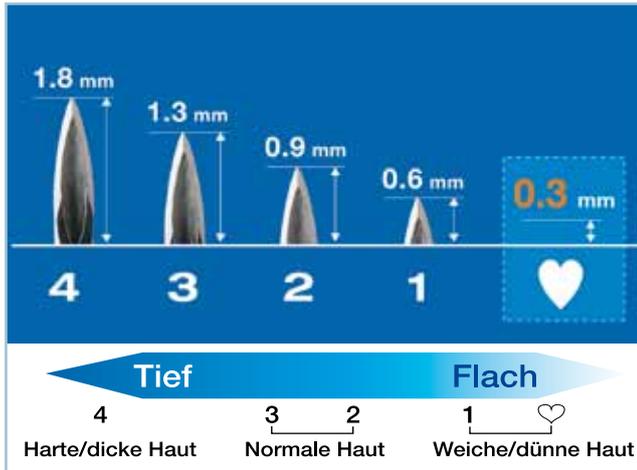

5 einstellbare Stechtiefen

- Anpassbar an den individuellen Hauttyp des Patienten
- Geringe Stechtiefe, nur 0,3 mm
- Ermöglicht eine besonders sanfte Blutentnahme

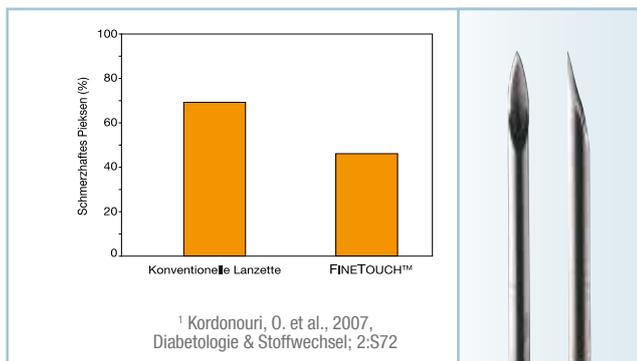

Funktionelles Design

- Hohlraumkanüle mit speziellem Schliff für spürbare Schmerzreduktion.
- In einer Studie empfanden 54% der Patienten die Finetouch® Lanzette als schmerzarm, 31% die konventionelle Lanzette.¹



Durch die kleine Auflagefläche der Lanzettengehäuse-Spitze ist die gewünschte Punktionsstelle besonders leicht zu treffen.

Sichere Anwendung

Hygienische Handhabung

- Das Lanzettengehäuse schützt das Lanzettengerät vor Hautkontakt und Verunreinigung mit Blut und verhindert so eine Kreuzkontamination.

Sicherheit für Anwender

- Die Lanzettenkanüle ist vor und nach dem Einstich von einem Kunststoffgehäuse umgeben, zum Schutz vor unbeabsichtigten Nadelstichverletzungen.
- Die Mehrfachverwendung einer Lanzette ist nicht möglich. Erst das Aufsetzen einer neuen Lanzette gibt den Auslösemechanismus wieder frei.

Einfache Handhabung

Die Lanzette wird mit einem einfachen Handgriff in das Lanzettengerät eingesetzt.
Wenn Sie ein „Klick“ hören, ist das Gerät einsatzbereit.



1. Stechtiefe einstellen:

Gewünschte Einstichtiefe mit dem Wählrad einstellen.



2. Lanzette einsetzen:

Lanzette fest bis zum Anschlag einschieben
(deutlicher Klick hörbar).

Orangefarbene Schutzkappe drehen und abziehen.



3. Blutentnahme:

Lanzette leicht gegen die Haut drücken und Auslöse-
taste (PUSH) drücken.



4. Entsorgung:

Lanzette abziehen und sicher in einem dafür vorge-
sehenen Behälter entsorgen.

TERUMO FINETOUGH®

TERUMO FINETOUGH® Lanzettengerät Typ S



Artikelnummer	Sprachen	Verpackung
MS*GN03C	EN / FR / DE / NL / IT / EL	1 / 10 / 100



TERUMO FINETOUGH® Lanzette



Artikelnummer	Sprachen	Verpackung
MS*GN4530C	EN / FR / DE / NL / IT / EL	30 / 300 / 3000



Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

European Offices

**Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division**
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396
Fax: 0800 0220414

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 130 96 13 00
Fax: +33 130 43 60 85

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Bodenackerstrasse 3
8957 Spreitenbach, Switzerland
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11

Terumo Europe España SL
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid),
Spain
Tel.: +34 9021 01 298
Fax: +34 9021 01 358

Terumo Italia S.r.l.
Via Simone Martini, 143 / 145
00142 Roma RM,
Italy
Tel.: +39 0651 96 14 20
Fax: +39 0650 30 407

Terumo Sweden AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
426 71 Västra Frölunda,
Sweden
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890

**Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB**
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80

Terumo UK Ltd
Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax: +44 1784 476 201

**Terumo Europe N.V.
Moscow Representative Office**
BC Northern Tower
13Fr., 10 Testovskaya Street
Moscow 123317, Russia
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

**Addresses subject to change,
please consult our Website.**

© Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
DI 42DE-0908TE-III(04.12)E