

# Die Besonderheiten der einzigartigen Accu-Chek Mobile Technologie

- Komfortabler Wechsel der Kassette nach 50 Tests
- Einfache Blutentnahme mit 1-Klick-Stechhilfe
- Automatischer Lanzettenwechsel ohne Lanzettenkontakt
- Speicher für 2.000 Messwerte
- Bequemes Auslesen der Daten per USB



Erleben, was möglich ist.

## Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!  
**Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800** (Mo-Fr, 8.00-18.00 Uhr).  
Oder besuchen Sie unser Online-Portal unter [www.accu-chek.de/mobile](http://www.accu-chek.de/mobile)

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE und FASTCLIX sind Marken von Roche.  
© 2012 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)

Roche Diagnostics Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

05532604990 ④ 0912



**ACCU-CHEK®**



# Einzigartig.\*

## Accu-Chek Mobile – Messen Sie Ihren Blutzucker wann und wo Sie wollen.



*Wechsel der Testkassette erst nach 50 Tests*

*Integrierte 1-Klick-Stechhilfe*

*Lanzettentrommel mit 6 Lanzetten*

Ausgezeichnet mit:



\* Das einzige Blutzuckermesssystem mit 50 Tests pro Kassette, 1-Klick-Stechhilfe und Sechs-Lanzetten-Trommel

**ACCU-CHEK®**

## Flexibilität für Ihren Diabetesalltag.

**Alles, was Sie zum Messen brauchen, haben Sie sofort zur Hand – in einem Gerät.**

Sie wünschen sich ein Blutzuckermesssystem, das Ihren flexiblen Alltag unterstützt? Accu-Chek Mobile enthält alles, was Sie für die Blutzuckermessung benötigen:

- Testkassette mit 50 Tests – keine einzelnen Teststreifen
- Komfortabler Wechsel der Testkassette erst nach 50 Tests
- 1-Klick-Stechhilfe mit Sechs-Lanzetten-Trommel für einfachen Lanzettenwechsel – kein direkter Lanzettenkontakt
- Kein Entsorgen einzelner Teststreifen oder Lanzetten



## Messen in vier einfachen Schritten.




**1 Öffnen**  
Öffnen Sie den Spitzenschutz. Das Messgerät schaltet sich ein.



**2 Blut entnehmen**  
Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die Seite Ihrer Fingerkuppe. Drücken Sie jetzt den Auslöseknopf ganz nach unten: Nur 1 Klick zum Spannen und Auslösen.



**3 Messen**  
Tragen Sie den Blutstropfen in der Mitte des Testfeldes auf. Berühren Sie dabei das Testfeld nur sanft.

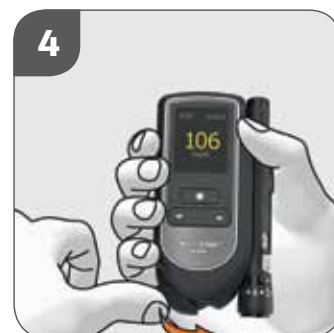

**4 Schließen**  
Nach etwa 5 Sek. können Sie das Ergebnis ablesen. Wenn Sie den Spitzenschutz schließen, schaltet sich das Messgerät aus.