

# UNGUISAN®

Die Formel für gesunde Nägel



# UNGUISAN®

## Classic

### Die bewährte Methode für professionelle Nagelprothetik

Unguisan Classic bietet Ihnen zwei Methoden für die Anfertigung künstlicher Zehennägel, die in Farbe, Form und Beschaffenheit natürlichen Nägeln zum Verwechseln ähneln. Dabei hat die Plattenprothese einen großen therapeutischen Nutzen, weil sie es ermöglicht die Form des gesamten Nagelorgans positiv zu beeinflussen.

Beim Aufgussverfahren wird die Unguisan-Masse aus Pulver und Flüssighärter angerührt und nach Erreichen der richtigen Konsistenz mit einem Spatel aufgetragen und geformt. Diese Methode eignet sich besonders für kleinere Reparaturen oder Teilergänzungen der Nagelplatte.

Mit dem neuen Start-Set in der praktischen Aufbewahrungsbox haben Sie alle Utensilien für beide Techniken für ca. 30-40 Anwendungen ordentlich zu Hand.



- |    |         |   |
|----|---------|---|
| 1  | PG-1100 | UNGUISAN-Pulver inkl. Dosierlöffel, 30 ml                         |
| 2  | PG-1000 | UNGUISAN-Härterflüssigkeit inkl. Glaspipette, 30 ml               |
| 3  | PG-2100 | UNGUISAN START-SET, 12-teligen Komplett-Paket inkl. Schulungs-DVD |
| 4  | PG-1400 | Glaspipette mit Silikonbalg                                       |
| 5  | PG-1500 | Dosierlöffel, Kunststoff  |
| 6  | PG-1600 | Mischspatel, Edelstahl, rostfrei                                  |
| 7  | PG-1700 | Mischgefäß aus Silikon, blau                                      |
| 8  | PG-1300 | Dosierflasche für Härter, 50 ml                                   |
| 9  | PG-1900 | Nagelplatte für Plattenprothese, 1 Stück 125 x 125 mm             |
| 10 | PG-1800 | Zellglasstreifen, 25 Stück, 25 x 90 mm                            |
| 11 | PG-2000 | Fingernagelschablonen, 100 Stück, selbstklebend                   |
| 12 | PG-2202 | DVD-Schulungsfilm   |
|    | PG-2250 | Gebrauchsanleitung Nagelprothetik                                 |

# UNGUISAN®

## Blue Light

### Einfache und sichere Befestigung von Nagel-Korrekturspangen – 1, 2 fertig!

Die Anfertigung von Nagelkorrekturspangen ist kompliziert genug. Mit dem Unguisan Blue Light System wird die Befestigung aller Arten von Drahtspangen zum Kinderspiel. Es besteht aus einem lichthärtenden Gel in praktischer Dosierspritze, welches sich mit der speziell entwickelten Hochleistungs-LED-Lampe in nur 20 Sekunden verarbeiten lässt.

Neben Spritze und Lampe benötigen Sie keine weiteren Instrumente und die optimierte, leicht elastische Endfestigkeit des Gels sichert die Spange besonders dauerhaft auf dem Nagel.

Unguisan Blue Light ist äußerst ergiebig und reicht für bis zu 100 Anwendungen, da nur die tatsächlich benötigte Menge verbraucht wird. Testen Sie es selbst.



### Die wichtigsten Vorteile:

- flexibel: das System ist für alle Arten von Draht-Spangen geeignet
- bequem: es werden nur 2 Arbeitsmittel benötigt (Lampe und Gelspritze)
- schnell: nur 20 sec. Aushärtezeit durch 1,3 Watt Hochleistungs-LED Lampe
- sparsam: 1 Spritze reicht für bis zu 100 Anwendungen, keine unnötigen Material-Reste
- sicher: Blau-Licht statt schädlicher UV-Strahlung
- einfach: genau dosierbar dank der speziellen Dosierspritze sind keine weiteren Instrumente nötig
- dauerhaft: Das elastische Gel passt sich der Bewegung der Nagelplatte an und sichert die Spange dauerhaft



**1. Precise application of GEL with the syringe**



**2. Just 20 sec. hardening time with high performance LED lamp**



**Ready! Fast and long lasting fixation of the nail brace**



PG-3000	UNGUISAN Blue Light Gel, 3ml
PG-3100	UNGUISAN Blue Light, Hochleistungs-LED lamp
PG-3110	UNGUISAN Blue Light Schutzbrille
PG-3200	UNGUISAN Blue Light, Start-Set inkl. 2 x Gel and 1 x LED Lampe

# UNGUISAN®

## Nailcare

### Nagelpflege-Konzentrat für Pilz-empfindliche Nägel mit Urea und Silber

Unguisan Nailcare pflegt spröde und splittige Nägel und macht harte Nagelhaut weich und geschmeidig. Durch seine innovative Formel mit Urea und Silber bietet es zusätzlich effektiven Schutz pilzempfindlicher Nägel und ist somit ideal zur Unterstützung podologischer Behandlungen geeignet. Das Konzentrat ist hochergiebig, d.h. es reicht für über 750 Anwendungen, ist dermatologisch getestet und für Diabetiker geeignet.

#### Perfekte Pflege für jeden Tag

Anwendung: 1-2 Tropfen direkt aus der Tropfflasche auf den Nagel träufeln und einmassieren. Hochergiebiges Konzentrat, sparsam verwenden. Empfohlene Anwendung zweimal täglich.



#### Wichtige Inhaltsstoffe:

- Stabilisierter Silber Komplex: Anti-mikrobielle Eigenschaften
- Island Moos Extrakt: Anti-mykotische Eigenschaften
- Schwarze Johannisbeeren Extrakt: Anti-mykotische Eigenschaften
- Urea: Hornhaut erweichend, Penetration fördernd
- Salicylsäure: Hornhaut erweichend



- |         |   |
|---------|---|
| PG-3501 | UNGUISAN Nailcare Start-Set, 12 x 30 ml inkl. Display |
| PG-3500 | UNGUISAN Nailcare, Nagelpflegekonzentrat, 30 ml       |
| PG-3752 | UNGUISAN Nailcare, Infobroschüre                      |

# UNGUISAN®



## Kontakt:

Greppmayr GmbH  
Gautinger Str. 40a  
82061 Neuried  
Germany

Telefon: +49 (89) 759 69 69-0  
Fax: +49 (89) 759 69 69-60  
E-Mail: [info@greppmayr.de](mailto:info@greppmayr.de)

[www.unguisan.de](http://www.unguisan.de)